

取扱説明書

ベッドのパイオニア
embassy

マルチクイック TB-1126


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。

- テーブルの上に設置した際、胸部やフェイス部の角度によって不安定になり落下する恐れがあります。ご使用時には十分にご注意ください。
- 胸部やフェイス部の角度調整後、しっかりとロックされている事を確認の上、ご使用ください。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。



使用方法

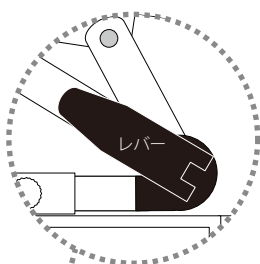

レバーを手前に引く事でロックが解除され、フェイス部の位置を無段階で調節することができます。ベースを持ち上げることで約6cmのリフトアップが可能です。ご希望の位置に調節後、レバーを元の位置に戻してロックしてください。

ご使用前に必ず確実にロックされているかをご確認ください。

- ⚠ 施術中にロックが外れる可能性があります。ご使用中は十分にご注意ください。
- ⚠ 施術等をお受けのお客様が、無意識にレバーに触れフェイス部のロックを解除し、危険な事故につながる可能性があります。十分にご注意ください。

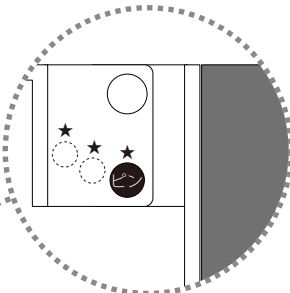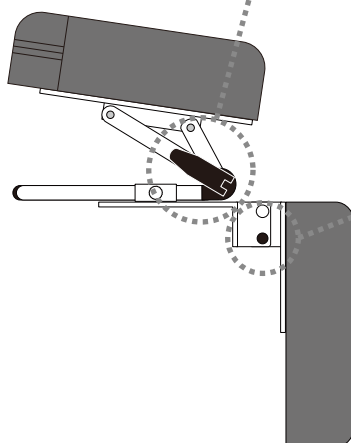

ピンを手前に引く事でロックが解除され、胸部の位置を三段階で調節することができます。裏側の穴にピンが入ることにより、角度がロックされます。

- ピンが確実にロックされている事をご確認ください。
- ⚠ 万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。



ベッドのパイオニア
株式会社 エンバシー

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-25-14
TEL. 0120-64-9005
URL <http://www.embassy.co.jp/>