

HPベッドシリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドをリクライニング・脚あげを行う場合は、寝ている患者様やまわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故等の原因となります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆりみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因となります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	クランクハンドル操作時に指を挟まないよう十分注意してください。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

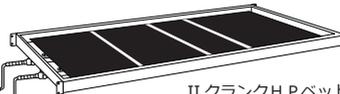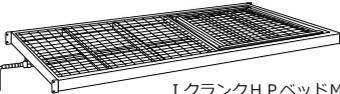部品図	部品名	個数
	脚部	2
 HPベッド  I クランクHPベッド  II クランクHPベッド  HPベッドM  I クランクHPベッドM  II クランクHPベッドM	天板	1


マット止め金具	六角ボルト・小	六角ボルト・大	平ワッシャー	Sワッシャー	袋ナット	ボルトキャップ	スパナ
							
1 ※	2 ※	8	16	8	8	8	2

※ I クランクHPベッド・II クランクHPベッド・I クランクHPベッドM・II クランクHPベッドMのみ



組立方法

● 組立時間：20分～40分 ※組立にはプラスドライバーが必要です。


①天板にマット止め金具を取り付けます。(※ I クランクHPベッド・II クランクHPベッド・I クランクHPベッドM・II クランクHPベッドMのみ)

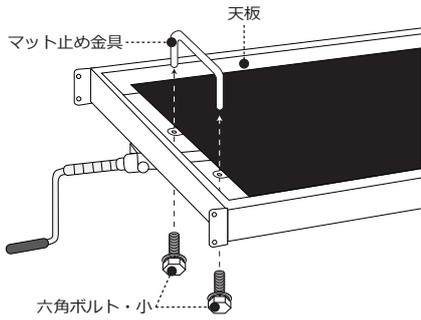


②天板に脚部を取り付けます。

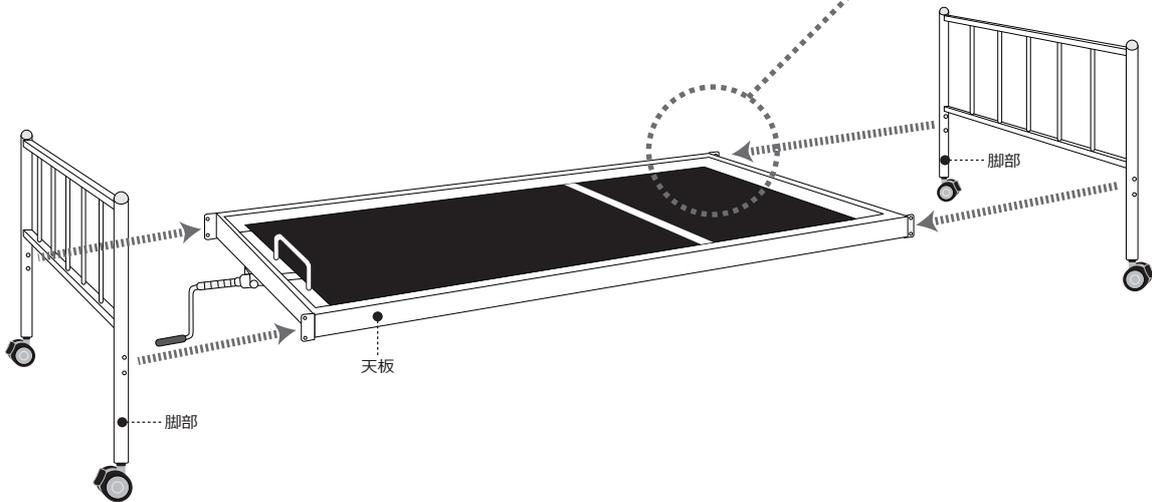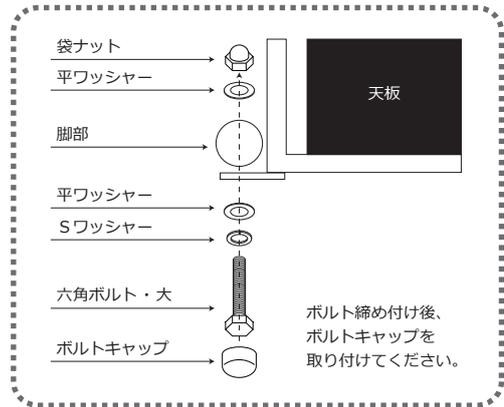


クランクハンドルの収納方法

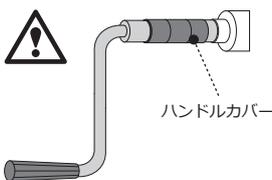

※操作時には必ずハンドルカバーだけを持って操作してください。ハンドルカバー以外の部分を持って操作すると、手をケガする恐れがあります。

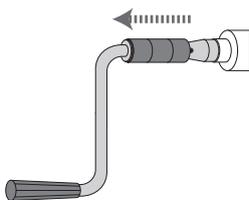

①ハンドルカバーを握り、手前に引きます。

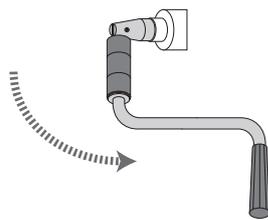


②手前いっぱいまで引いた状態で下に折るような感じで下げます。

③ハンドルを広げる場合は逆の手順で操作してください。

④ポジションをセッティング後、ベッドを使用するにはハンドルを必ず収納した状態でご使用ください。ハンドルにつまずき、転倒する恐れがあります。

※操作時に指を挟む恐れがあります。ご注意ください！

定期メンテナンスのお願い

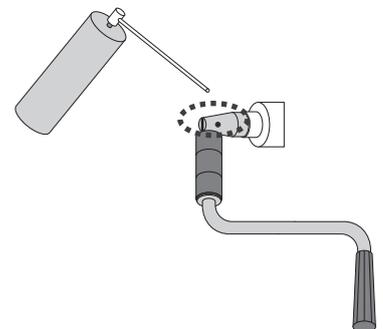

1年に数回、またハンドルカバーの動きが悪い場合、部分に市販の潤滑スプレーを吹き付けてください。