

アトムシリーズ


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。


- 設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に異常なゆれやゆるみ、がたつき、傾き、異常音等が発生したときは各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。

高さ調節方法

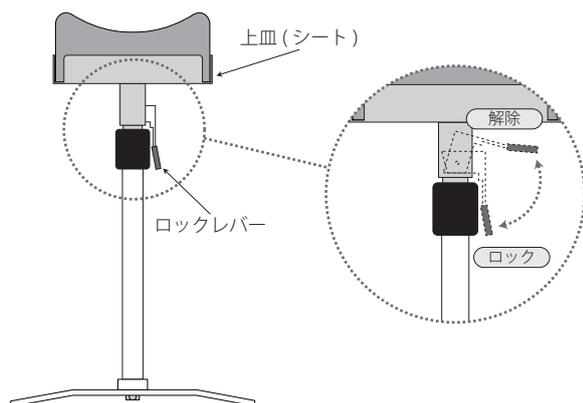

片方の手で上皿(シート)を持ちながら、ロックレバーを持ち上げてロックを解除してください。ご希望の高さに調節し、ロックレバーを下げ、上皿(シート)をロックしてください。

※ レバーが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

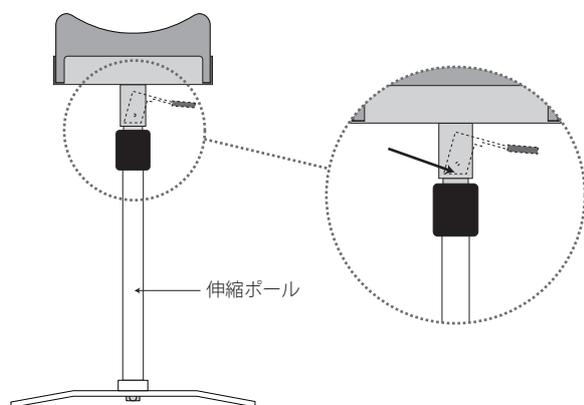

⚠ 無理にレバー操作されると、レバー破損の原因となります。

ロックレバーが固くなった際には左図の矢印部分に、グリスなどの潤滑油を注入してください。

※ 決して伸縮ポール内に、潤滑油を注入しないでください。ロックができなくなります。