

## SDセブン・MRセブン・クロムセブン

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



## 安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	本製品を設置する際は、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

<b>注意</b>	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	可動部を調節する際、指などを挟まないようにご注意ください。
	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。


# 各部の名称および使用方法

## ベッドの設置方法

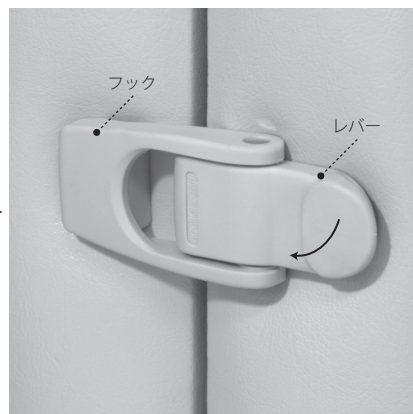


① 止め具のレバーを持ち上げフックを外します。

ベッドを設置する際は、十分なスペースを確保してください。

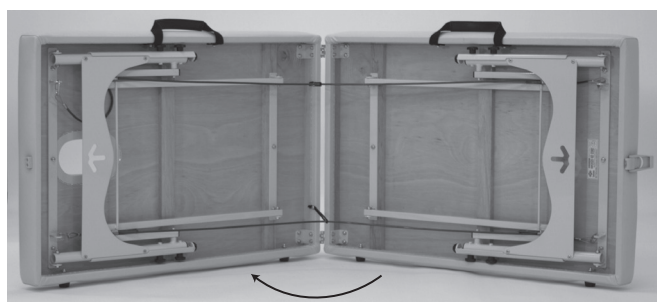


② ベッドを開きます。

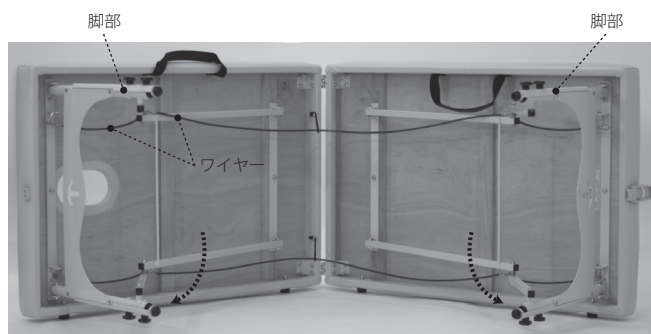


③ 両側の脚部を持ち上げます。  
※ ワイヤーが絡んだり引っかかっていないか確認してください。

④ ベッドを起こして設置してください。  
※ 人が乗っていない状態では、天板は水平ではなく、若干のへの字型になるように設計されております。ご注意ください。

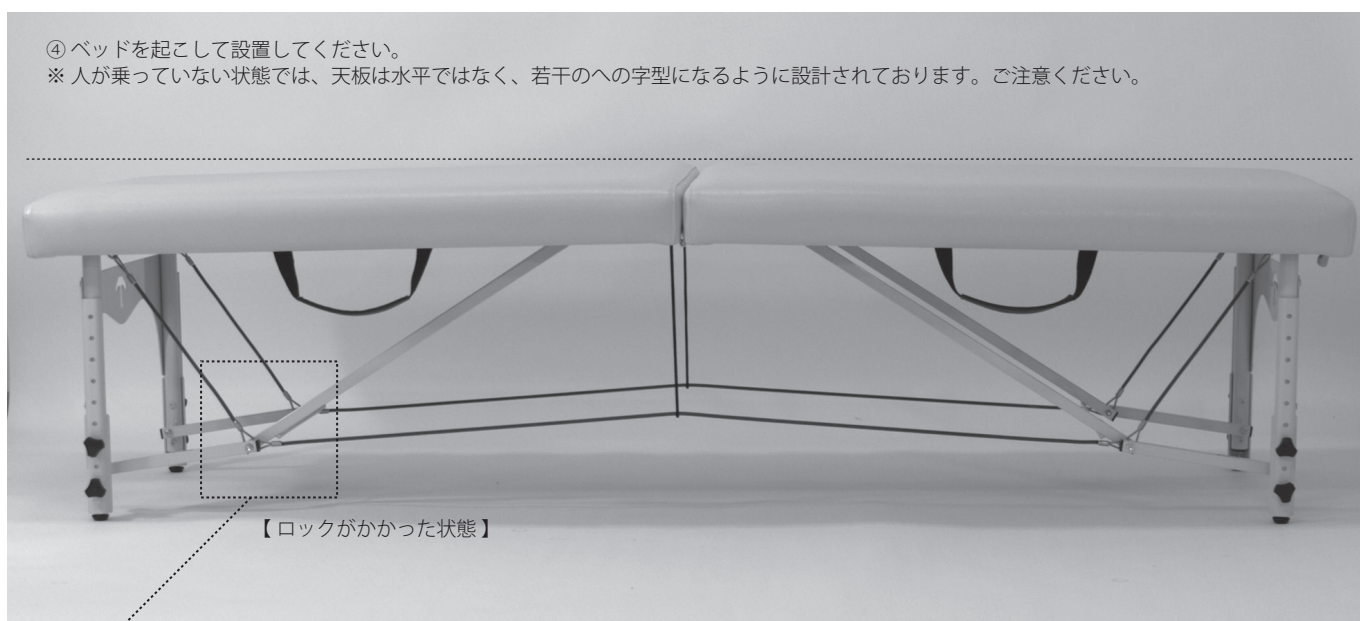

【ロックがかかった状態】

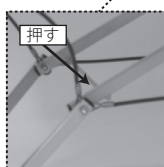

※ **ご注意ください。**

脚部のステーは必ず、上記画像のようにロックがかかった状態にして設置してください。  
ロックがかかっていない状態(左記画像)で使用すると、事故・けが・破損の原因となります。

# 各部の名称および使用方法

## 脚部の高さ調節方法



① ノブネジ (2箇所) を反時計回りに回します。  
(合計 8箇所)



② ノブネジを外します。



③ 外脚を外します。



④ ご希望の高さに外脚を調節し、外脚の穴  
(2箇所) に内脚のネジを差し込んでください。



⑤ ノブネジをしっかりと締めてください。

※ 4本の脚部の高さが全て同じ位置になっているか必ず確認してください。  
1カ所でも位置が異なった状態で使用すると、  
ベッドが破損する恐れがあります。  
ご注意ください。