

# 取扱説明書

ベッドのパイオニア  
embassy

## 手動式トリートシリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドを昇降させる際は、まわりの人の身体や手足、障害物がないか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故等の原因になります。
	ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物がないか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故等の原因になります。

<b>注意</b>	昇降の際は、人を乗せた状態で高さ調節をしないでください。落下事故の原因となります。またハンドルの寿命が著しく低下します。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆらみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因になります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	各セクションを稼働させる場合、手を挟まないようご注意ください。人身事故等の原因となります。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。	
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。	

## 設置方法



### ● 使用方法と注意事項

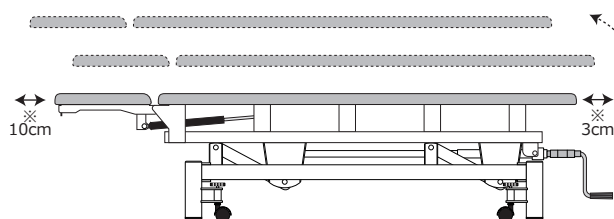


- 本製品は垂直に昇降しません。前後に円弧を描きながら昇降しますので、左記可動図の作動範囲（※印）以上を壁、または人から離して設置してください。
- ベッドの設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

# 各製品の可動範囲



TB-1043 手動式トリート2 S

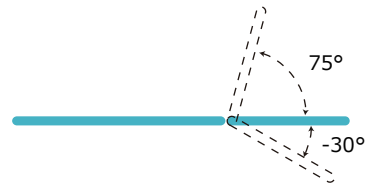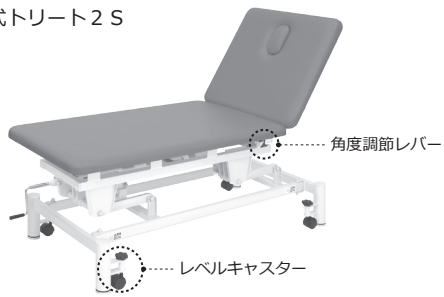



TB-1044 手動式トリート2 A

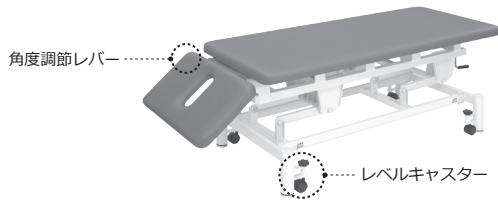



TB-1045 手動式トリート3 S

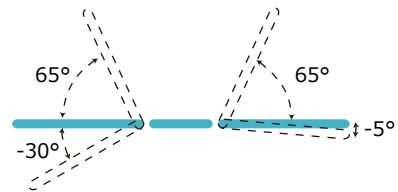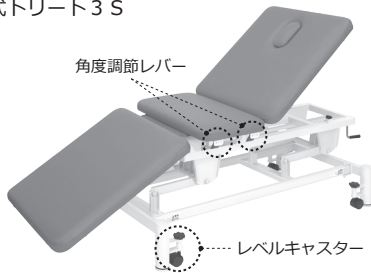



TB-1046 手動式トリート4 S

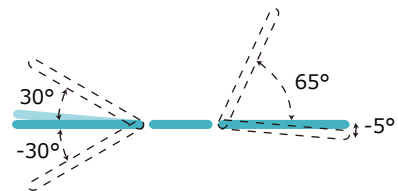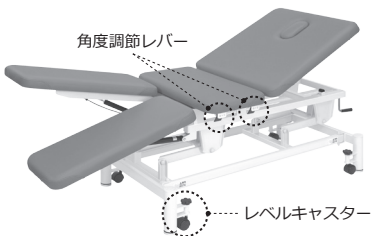


TB-1047 手動式トリート3 A

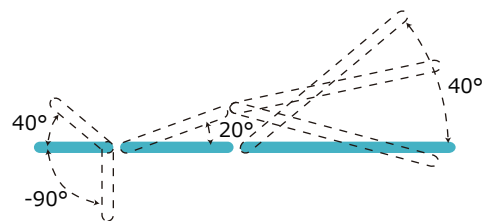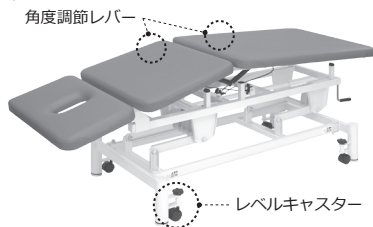

TB-1048 手動式トリート6 A

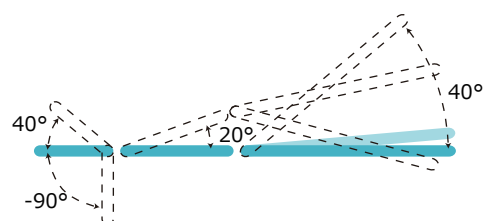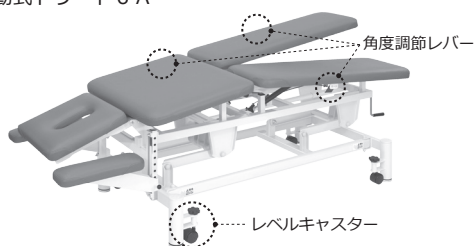


## 各シートの角度調節方法

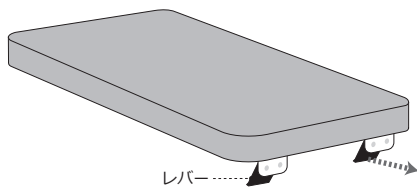

レバーを手前に引くことで、頭部・背部・胸部・脚部の角度調節をすることができます。ご希望の角度でレバーを離すと、固定できます。

## レベルキャスターの操作方法

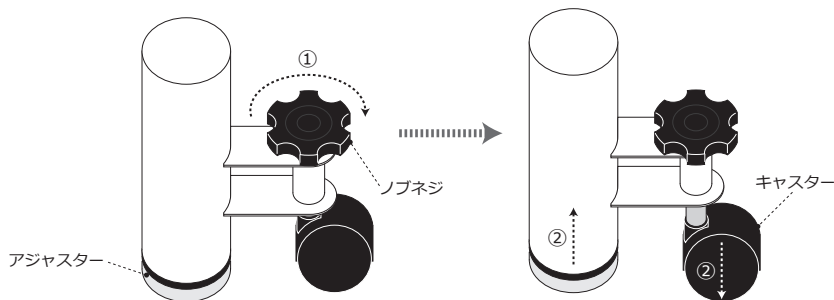


- ① 箇所のノブネジを時計回りに回します。
- ② キャスターが伸び、脚部が浮き上がりますので、ベッドが移動可能な状態になります。
- ③ ベッド移動後は、脚部アジャスターが床面にしっかりと設置するよう、ノブネジを反時計回りに回してください。脚部が床面に設置しているのを確認後、ベッドをご使用ください。

## 手置き部の取付方法

### ● 手動式トリート6A


- 設置するには、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に異常なゆれやゆらみ、がたつき、傾き、異常音等が発生したときは各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。

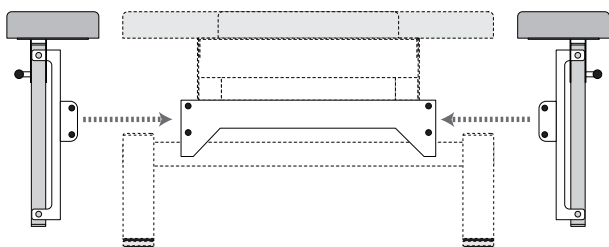


① 手置き部を横から差し込みます。

付属品	個数
六角ボルト	4
平ワッシャー	4
袋ナット	4
ボルトキャップ	4
スパナ	2

付属品の確認をしてください。

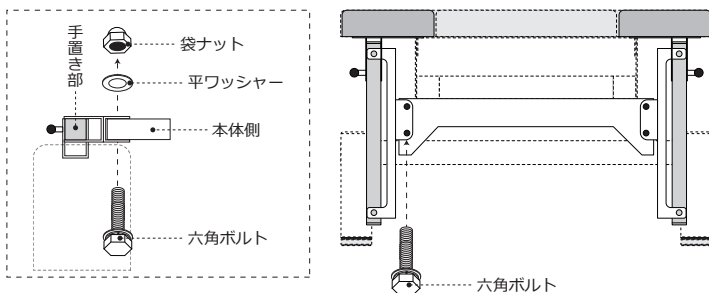


② 手置き部の穴と本体側の穴の位置を合わせて、六角ボルトを通してください。ボルトの先には平ワッシャー・袋ナットの順番でしっかり締め付けてください。

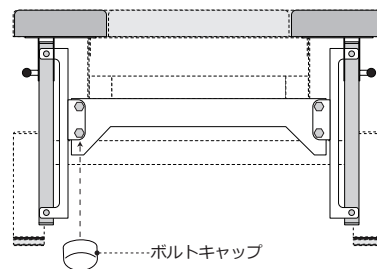


③ 六角ボルトを締め付けた後、ボルトにボルトキャップを被せてください。


## クランクハンドルの収納方法

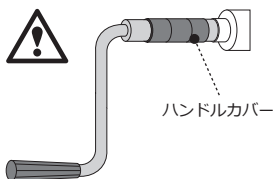

※操作時には必ずハンドルカバーを持って操作してください。ハンドルカバー以外の部分を持って操作すると、手をケガする恐れがあります。

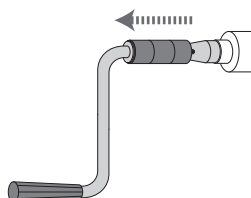

①ハンドルカバーを握り、手前に引きます。

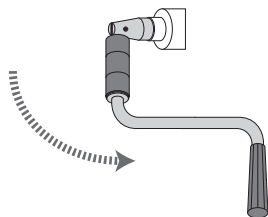


②手前いっぱいまで引いた状態で下に折るような感じで下げます。


③ハンドルを広げる場合は逆の手順で操作してください。

④ポジションをセッティング後、ベッドを使用する際にはハンドルを必ず収納した状態でご使用ください。ハンドルにつまづき、転倒する恐れがあります。

※操作時に指を挟む恐れがあります。ご注意ください！


### 定期メンテナンスのお願い

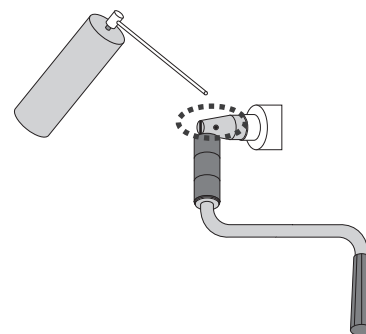

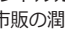1年に数回、またハンドルカバーの動きが悪い場合、部分に市販の潤滑スプレーを吹き付けてください。

## 異音が発生する場合

● 快適にお使いいただくために

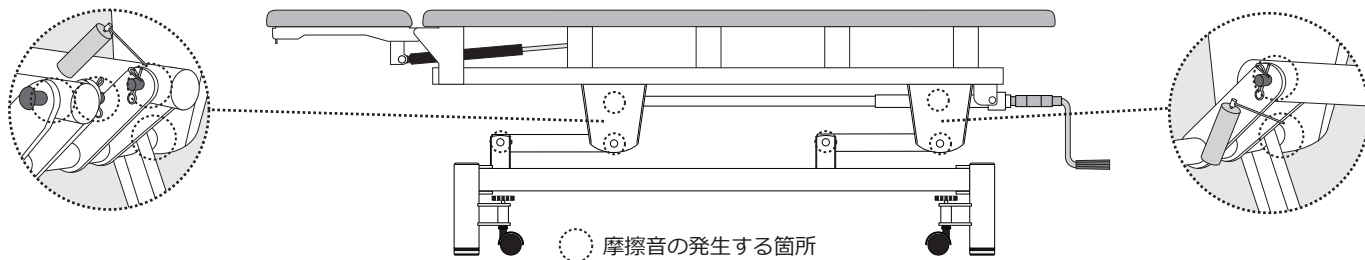

※回転部分またはボルト部分に市販の潤滑スプレーを吹き付けてください。

※潤滑スプレーを吹き付けた際にスプレーの飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等をあててご使用ください。

※潤滑スプレーは記載の使用方法をよく読んでから取り扱ってください。

※万一摩擦音が発生した場合、給油により軽減しますが、浸透するまでに2、3日かかります。軽減されない場合は、ご購入代理店にお申し付けください。

ベッドのパイオニア  
株式会社 エンバシー

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口 3-25-14  
TEL. 0120-64-9005  
URL <http://www.embassy.co.jp/>