

# 取扱説明書



ベッドのパイオニア  
embassy


## 運動療法台シリーズ


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

### 安全上のご注意



● ご使用の前に必ずお読みください。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

 <b>警告</b>	本製品を設置する際は、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
	本製品を火気に近づけないでください。
	湿気や多い所や、雨・風の当たる所に放置しないでください。
	本製品をご使用する場合、まわりに人やものがないか十分注意してください。人身事故や物損事故の原因となります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	幼児やご自分で意思表示ができない方へのご使用は避けてください。事故を起こす恐れがあります。
	ボールペン等、先のとがったものをポケットに入れてのご使用はおやめください。転倒したときにけがをする恐れがあります。


 <b>注意</b>	ご使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ご使用前にゆるみやがたつき、異様な音がしないか必ず点検してください。ぐらつきがある場合は、アジャスターで微調整してください。
	必ずお一人での使用をお願いします。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因となります。
	30分以上連続でご使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	本製品をご使用されると油圧式シリンダーは加熱してきます。やけどの恐れがありますので、不用意に触らないでください。ダイヤル調節をする時は、指などを挟まないよう十分注意してください。
	低温環境下では、油圧シリンダー内のオイルが硬化して適切な一定の負荷が発生しない場合があります。暖房等で一般的な適温を保持した室内でご使用ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境での使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。	

# 各部の名称および使用方法

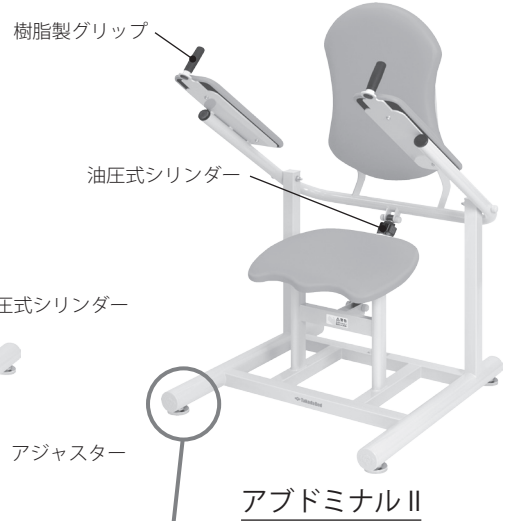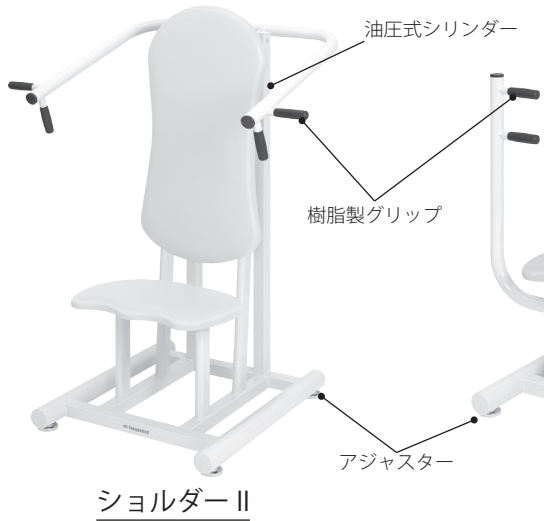

油圧式シリンダー


負荷調節は必ず管理者が行ってください。  
 ※作動中の負荷調節は故障の原因になります。  
 ※低温環境下では安定した負荷を維持できません。  
 必ず常温以上の室温でご使用ください。  
 ※負荷調節ダイヤルの硬さは油圧式シリンダーによって、  
 ある程度のばらつきがあります。予めご了承ください。

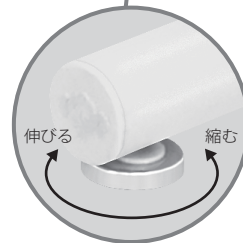

アジャスター




## 各部の名称および使用方法

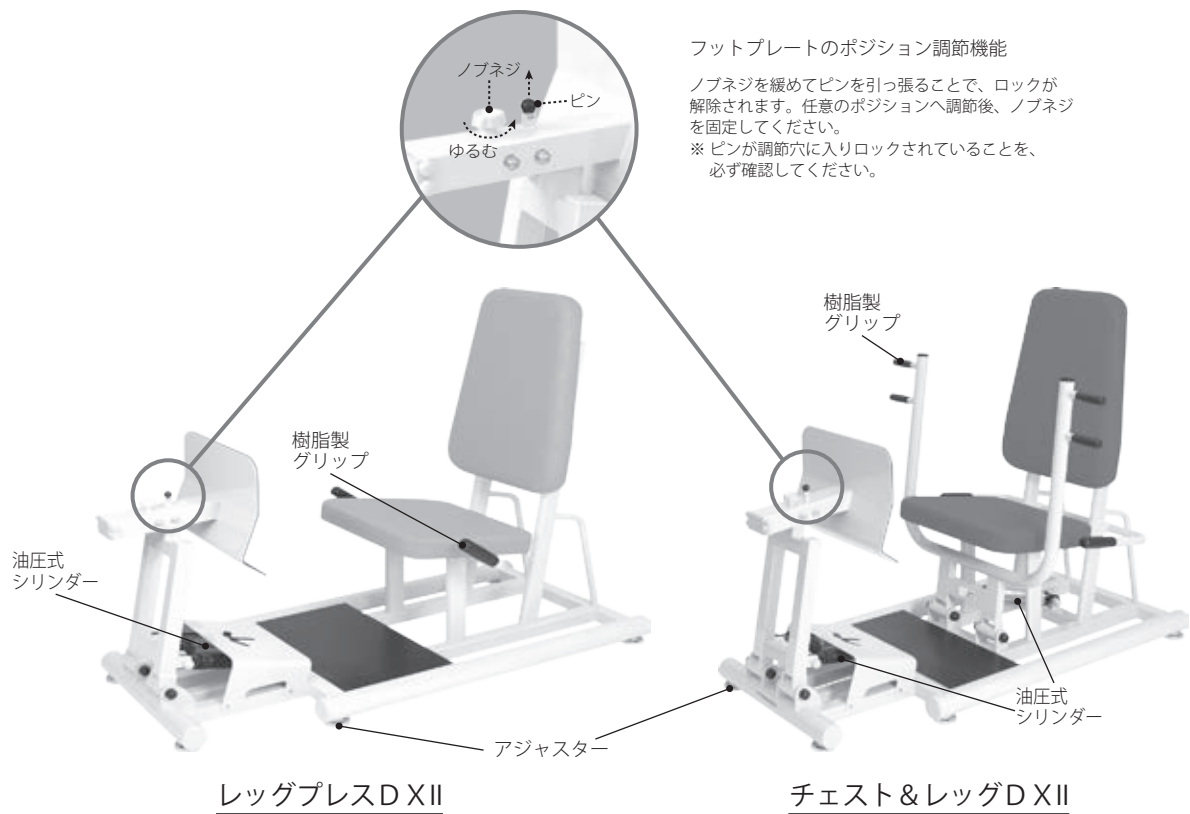

## 定期メンテナンスのお願い

付属のグリーススプレーを定期的に可動部分に吹き付けてください。給油を怠ると、がたつきや摩擦音の原因となります。グリースを吹き付けた際にグリースの飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等であててご使用ください。

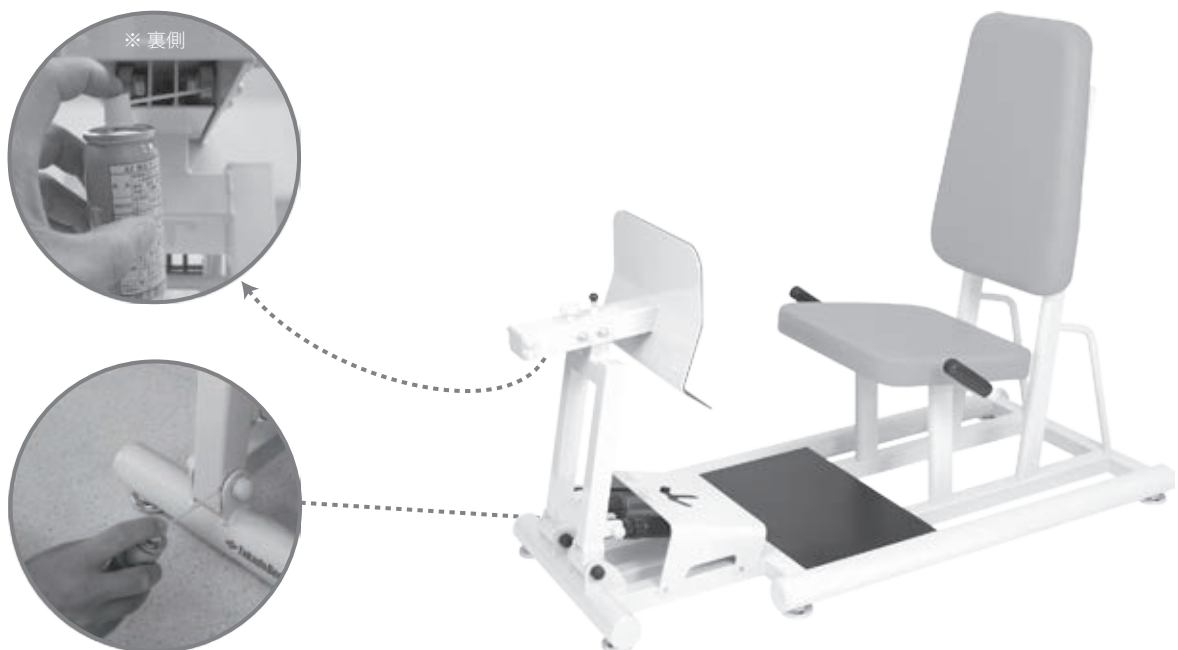

ベッドのパイオニア  
株式会社 エンバシー

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-25-14  
TEL. 0120-64-9005  
URL <http://www.embassy.co.jp/>