

取扱説明書



hurry(ハリー) TB-1442

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	改造や分解修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。
	本製品は目的以外の用途（歩行器や手すりなど）で使用しないでください。転倒してけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。
	本製品に手をついたり、寄りかかったりしないでください。不意に動き、転倒してけがをする恐れがあります。
	本製品を移動する際は必ずハンドルを持ってください。ハンドル以外のところ（ガードル架、スライドテーブルなど）を持って移動すると転倒してけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。
	本製品を移動する際は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。転倒してけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。
	本製品を移動する際は、天板上のものが落下しないように注意してください。落下したもので思わぬけがをしたり、落下したものが破損・変形する恐れがあります。
	引き出し・スライドテーブルを引き出した状態で、本製品を移動しないでください。引き出し・スライドテーブルが人にぶつかってけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。
	本製品を移動する時以外は、レバーから手を離しキャスターをロックしてください。不意に動き、人などにぶつかってけがをしたり、破損する恐れがあります。
	滑りやすい材質の床では、本製品を使用しないでください。不意に動き、人などにぶつかってけがをしたり、破損する恐れがあります。
	傾斜や段差のある場所では十分注意してください。転倒してけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。
本製品に液体（血液・薬液・水など）が付着した際は放置せず、すぐに乾いた布で拭き取ってください。感染症などを引き起こしたり、変質・変色する恐れがあります。	
指定以外の部品を使用すると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などによりけがをしたり、破損・変形する恐れがあります。	

注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	引き出しやスライドテーブルの出し入れの際に、指などはさまないよう注意してください。
	引き出しやスライドテーブルの出し入れは、静かに行ってください。勢いよく出し入れすると反動で本製品が動き、壁などを傷つける恐れがあります。
	スライドテーブルを使用しないときは本体に収めてください。人などにぶつかってけがをしたり、スライドテーブルが破損、変形する恐れがあります。
	ハンドルにものを掛けたり載せたりしないでください。載せたものが落下したり、ハンドルが破損、変形する恐れがあります。
	ハンドルを持って本製品を持ちあげないでください。ハンドルが破損、変形するおそれがあります。
	ガードル架のフックにものがかかった状態で本製品を移動しないでください。ものが落下してけがをする恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

各部の名称及び使用方法


●ご使用前に必ずお読みください。

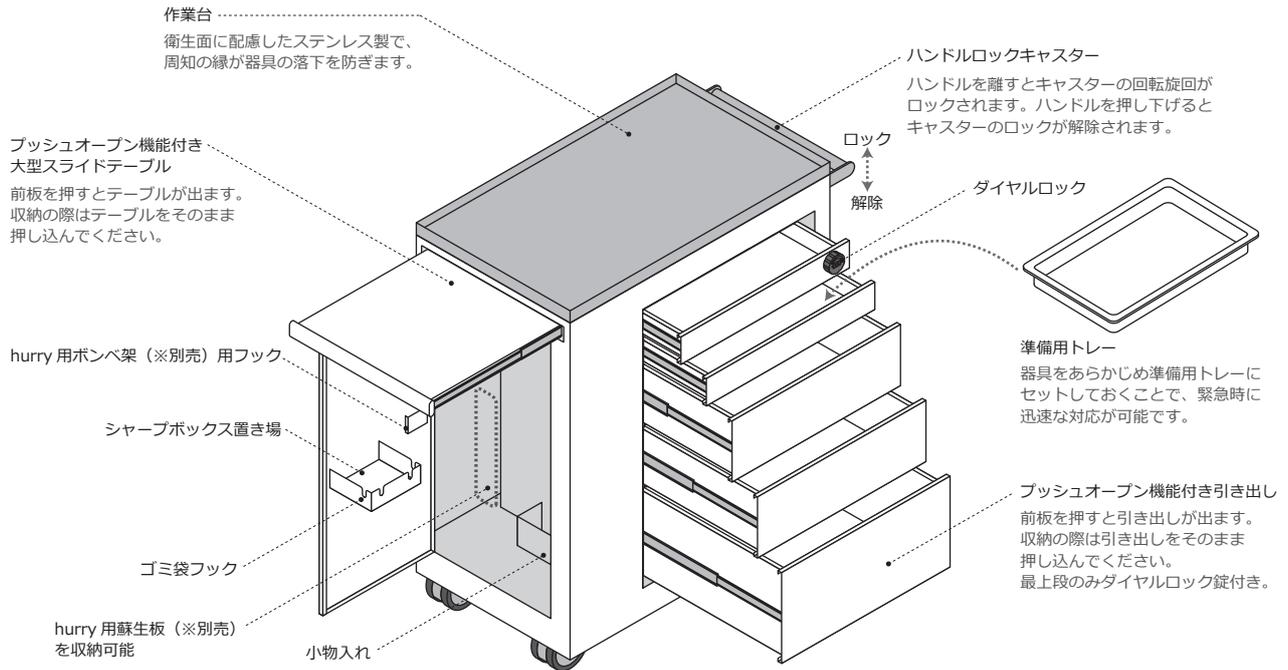

ダイヤルロックの暗証番号設定方法

数字 3 桁の任意の番号に設定できます。
(出荷時は、0・0・0 に設定されています。)

暗証番号変更は、つまみが施錠位置にあり
暗証番号が合っている状態でのみ変更可能です。

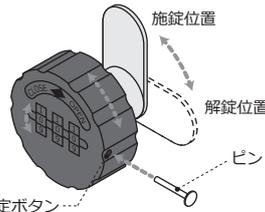


- ①つまみを施錠位置にし、暗証番号が合っている事を確認します。
- ②ダイヤル設定ボタンをピン等 (Φ3mm 以下) で押した状態のまま、任意の番号 (000 ~ 999) に合わせます。
- ③ピンを抜いて暗証番号の設定完了です。

⚠ 設定後、必ず指定した番号での解錠、施錠操作が行われるかご確認ください。

アルミ製仕切板の使用方法

長 3 枚、短 3 枚を用途に応じたサイズでクロスさせてご使用ください。

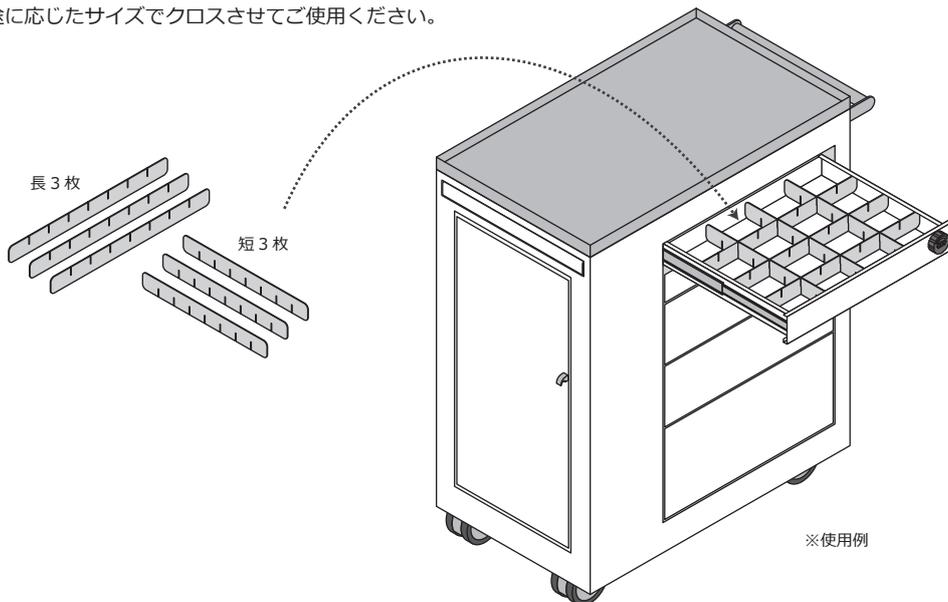


株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

付属品（※別売）の取付方法

※ドライバーが必要になります。

図のように hurry 用ポンベ架をフックに引っ掛けてください。

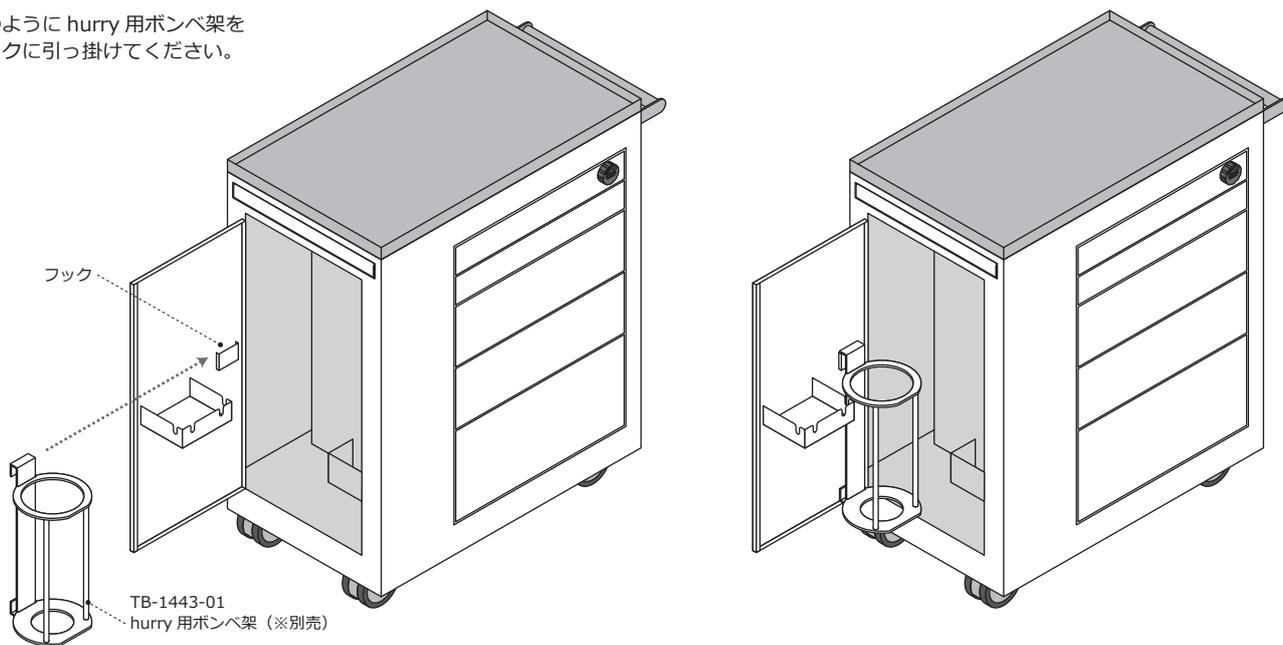

図のように hurry 用ガードル架を付属の皿ネジで取り付けてください。組ネジは、扉を開け裏側から取り付けてください。

