



アプローチ系製品全般


お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。




安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

 警告	ベッドを設置する際は、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

 注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	可動部調節時、指などを挟まないようにご注意ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

各部の名称および使用方法


縦型ヘッド裏側 ※ペーパーカッター付き

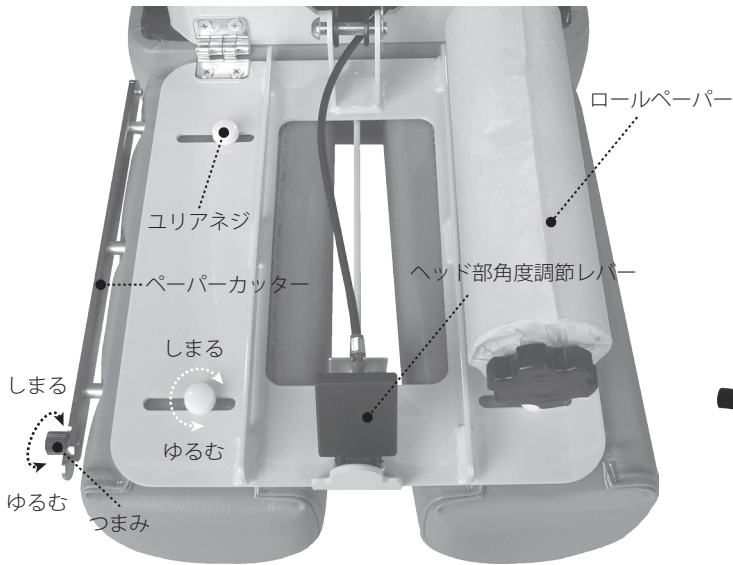

ユリアネジをゆるめる事で、ヘッドの幅を微調整できます。ご希望のヘッド位置でユリアネジをしめ、ヘッドを固定してください。


ペーパーカッターはつまみをゆるめるとプレートを動かせるようになります。ペーパーを挟んでプレートを戻し、つまみで固定してください。

開閉式ヘッド裏側 ※ペーパーカッター付き

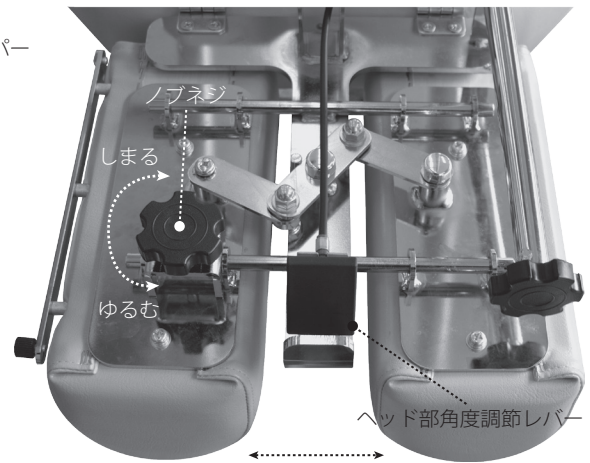

ノブネジをゆるめる事で、ロックが解除されヘッドの幅を微調整できます。ご希望のヘッド位置でノブネジをしめ、ヘッドを固定してください。


ヘッド部の角度調節

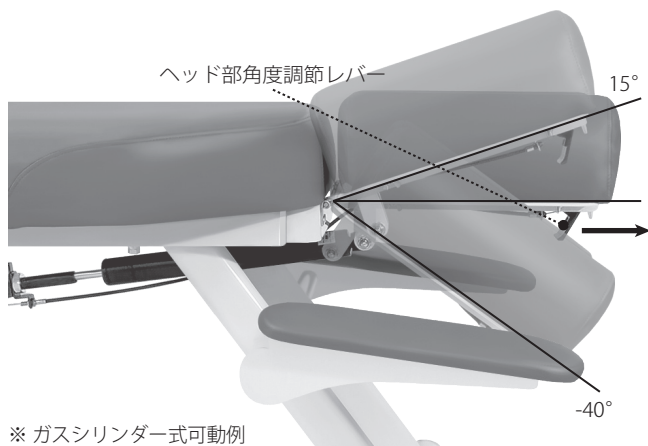

ヘッド部の角度を、15° ~ -40° (ガスシリンダー式 ※ 一部製品を除く)、15° ~ -15° (ラチェット式 ※ 一部製品を除く)の範囲で調節できます。

- ガスシリンダー式…ヘッド部角度調節レバーを矢印方向に引く事でヘッド部の角度調節をすることができます。ご希望の角度でレバーを離すと、ヘッド部を固定できます。
- ラチェット式…ヘッド部を持ち上げる事でご希望の角度(15段階)に調節することができます。角度を下げる時は、最上部まで持ち上げるとロックが解除され、最下部まで下げる事ができます。その後、ヘッド部を持ち上げご希望の角度に調節してください。

マルチ部裏側

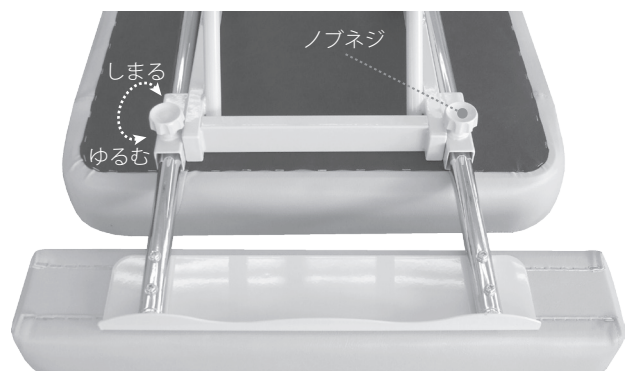

ノブネジをゆるめることでマルチ部を伸縮する事ができます。ご希望の位置でノブネジをしめ、マルチ部を固定してください。