

S Dポータル TB-1042 ・ M Rポータル TB-1052


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意


● ご使用の前に必ずお読みください。

- 設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に異常なゆれやゆるみ、がたつき、傾き、異常音等が発生したときは各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。


収納方法

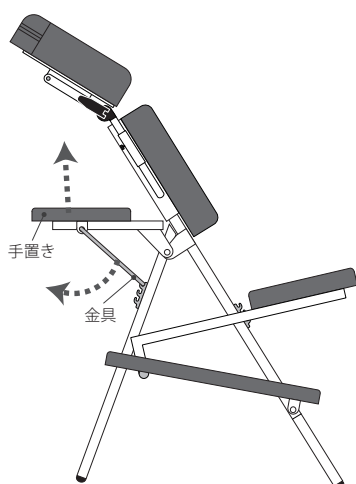


① 手置きを持ち上げ、金具を外します。

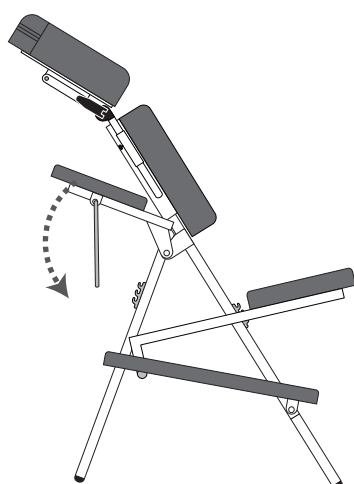


② 手置きを下に折りたたみます。

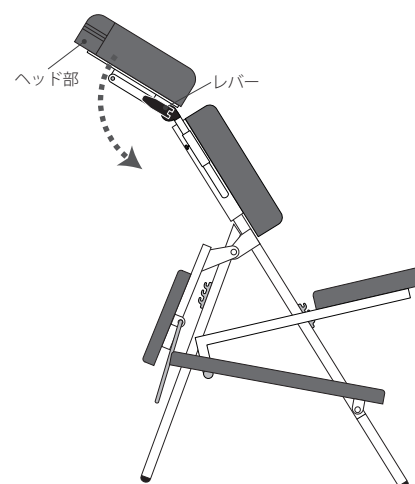


③ ヘッド部のレバーを解除し、ヘッド部を下に折りたたんでください。

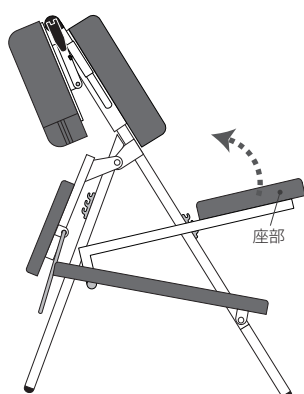


④ 座部を持ち上げ、ロックを解除してください。

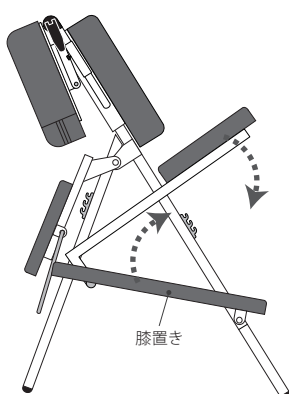

⑤ 座部を持ちながら、膝置きを上に起こしてください。

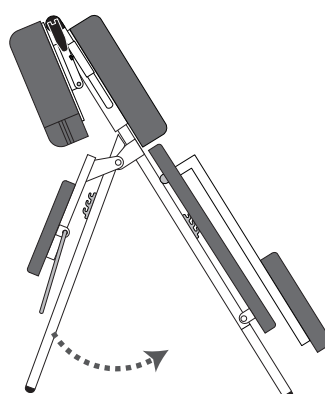


⑥ 手置き側の脚部を内側に折りたたみます。

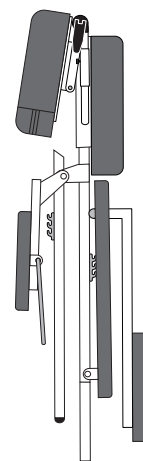


⑦ 完成です。


組立方法

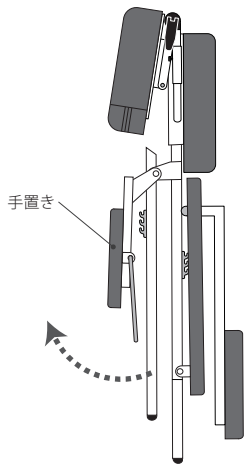


① 手置き側の脚部を開きます。

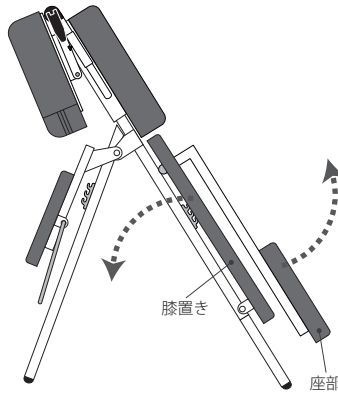


② 座部を持ち上げながら、膝置きを矢印の方向に倒します。

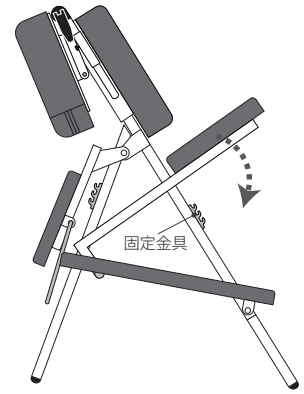



③ 座部を固定金具に差し込み、固定します。
※ 固定金具の位置によって、座部の角度を調節できます。

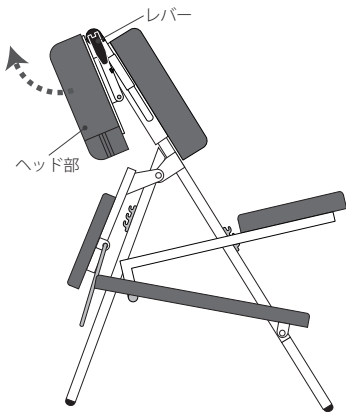


④ ヘッド部のレバーを解除し、ご希望の位置に調節後、レバーでロックしてください。

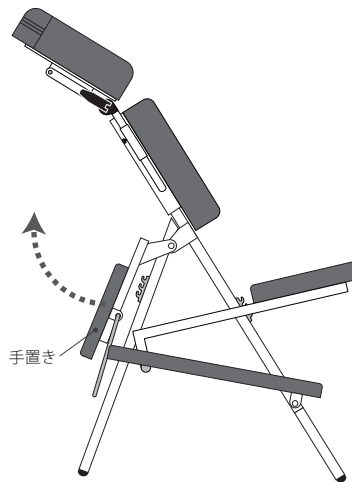


⑤ 手置きを持ち上げます。

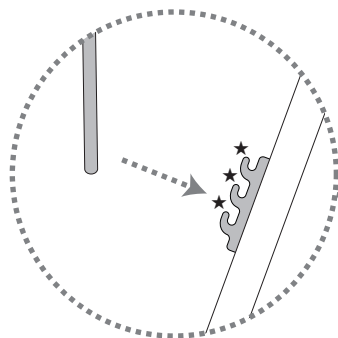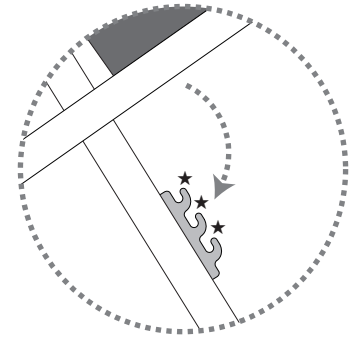

※ 固定金具の位置によって、手置きの角度を調節できます。

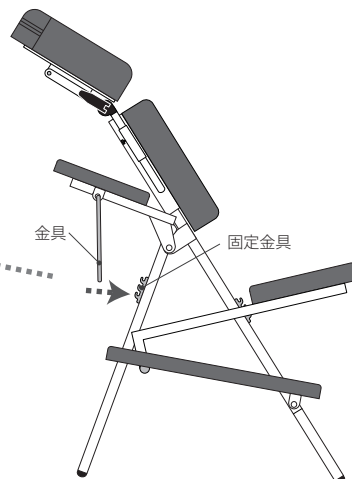


⑥ 金具を固定金具に差し込み、固定します。

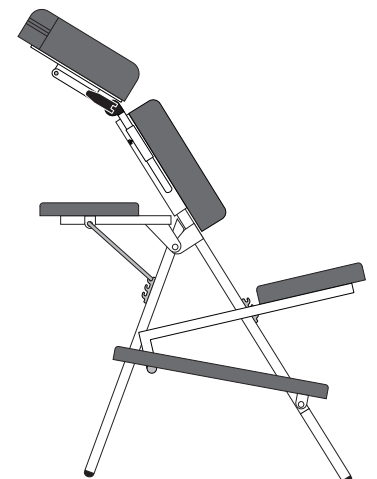

⑦ 完成です。


ヘッド部の角度調節

ベースのレバーを手前に引き上げる事でロックが解除され、フェイスの位置を無段階で調節することができます。ベースを持ち上げることで約6cmのリフトアップが可能です。ご希望の位置に調節後、レバーを引き下げロックしてください。

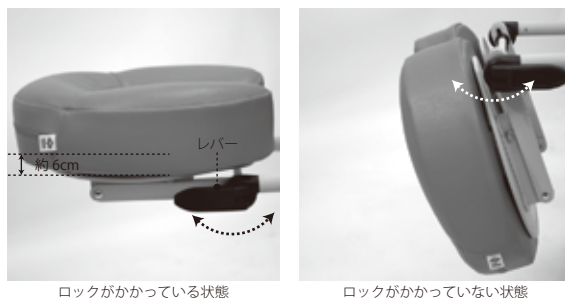


⚠️ ご使用の前に必ずお読みください。

- ⚠️ ご使用前に必ず確実にロックされているかをご確認ください。施術中にロックが外れる可能性があります。ご使用中は十分にご注意ください。
- ⚠️ 施術等をお受けのお客様が、無意識にレバーに触れフェイス部のロックを解除し、危険な事故につながる可能性があります。必ず下記画像のレバー位置にてご使用ください。

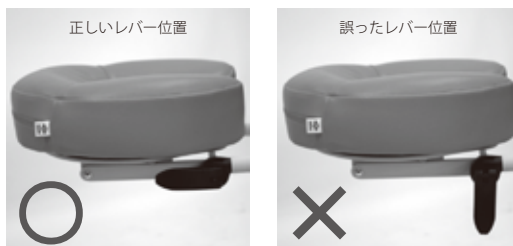

胸部の高さ調節

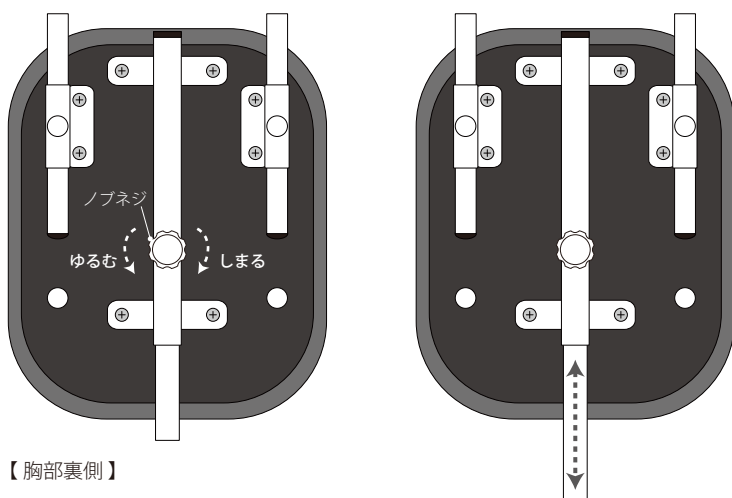

胸部裏側のノブネジを緩めることで、胸部の高さを調節することができます。ご希望の胸部位置でノブネジをしめ、胸部を固定してください。