

陣痛緩和チェアー TB-1063


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。


警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
警告	局部的に強い荷重をかけると、破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。

注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
注意	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。また、設置場所等には十分ご注意ください。また、設置場所等には十分ご注意ください。

手置き部の高さ調節方法と使用上のご注意

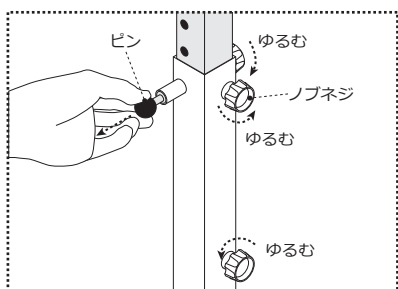

3カ所のノブネジをゆるめ、シートを持ちながら、ピンを引っ張り、ロックを解除してください。

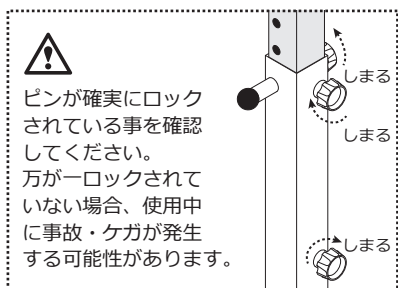

警告
ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、使用中に事故・ケガが発生する可能性があります。

支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。ご希望の高さに調整し、ノブネジをしめ固定してください。

警告 乗り降りの際や使用中に、下記の○の箇所に、手や足を入れないようにご注意ください。手や足を挟み、非常に危険です。

