

万能上肢台 TB-504


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意


● ご使用の前に必ずお読みください。

- 設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に異常なゆれやゆるみ、がたつき、傾き、異常音等が発生したときは各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。


組立方法

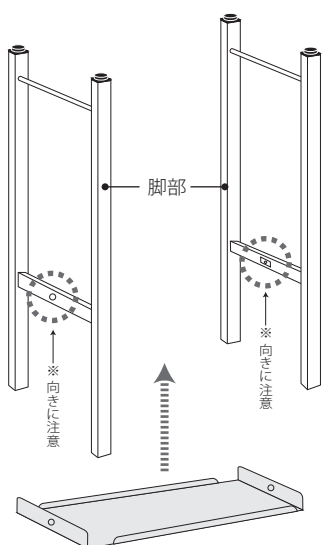


① スチール棚と脚部を組み立てます。

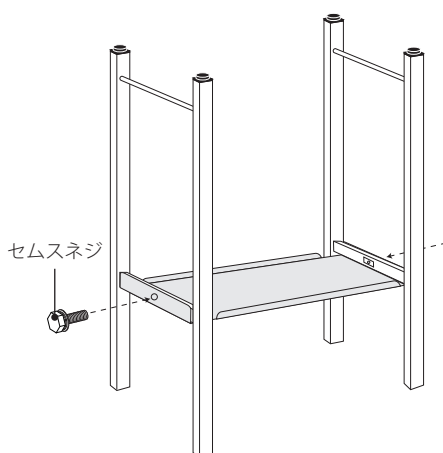

② 付属のセムスネジで仮止めます。

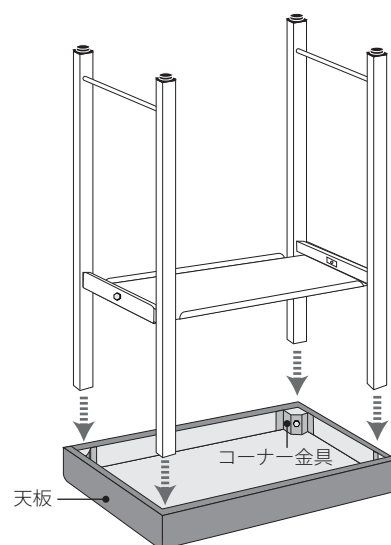

③ 天板のコーナー金具(4カ所)に脚部を差し込みます。

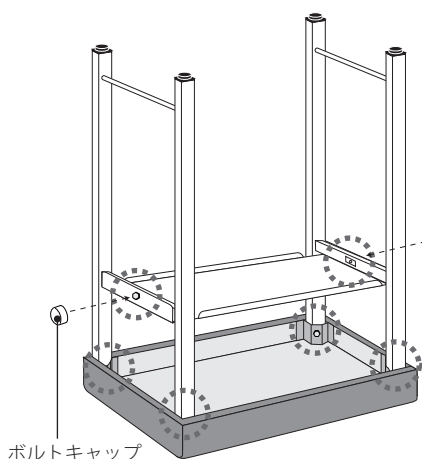

④ スチール棚(2カ所)、コーナー金具(4カ所)のボルトを付属のスパナで締め付けてください。ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。

