

## スロープ付歩行訓練台 TB-1327

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。




区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	滑りやすい床面や濡れている床面では本製品が動く恐れがあります。
	本製品を火気に近づけないでください。
	湿気が多い所や、雨・風の当たる所に本製品を放置しないでください。
	本製品は歩行訓練以外の目的で使用しないでください。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
本製品をご使用になる場合、お一人で使用しないでください。必ず付添人の元でご使用ください。	

<b>注意</b>	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	本製品は一人用です。複数人で同時に本製品をご使用にならないでください。転倒する恐れがあります。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。	

## 部品一覧表



● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

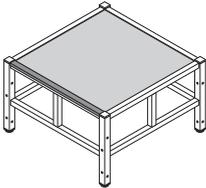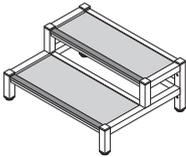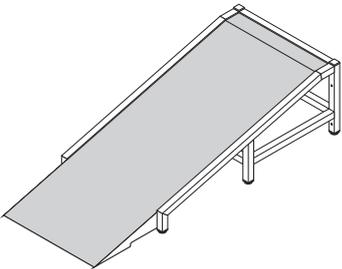部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	踊場	1		六角ボルト	8
	階段	1		平ワッシャー	16
	スロープ	1		Sワッシャー	8
				袋ナット	8
				ボルトキャップ	8
				スパナ	2

## 組立方法

● 組立時間：約 30 分

下図のように、踊場・階段・スロープを組み立ててください。【L字型】  
※踊場のゴムエッジがある面と階段を組み立ててください。

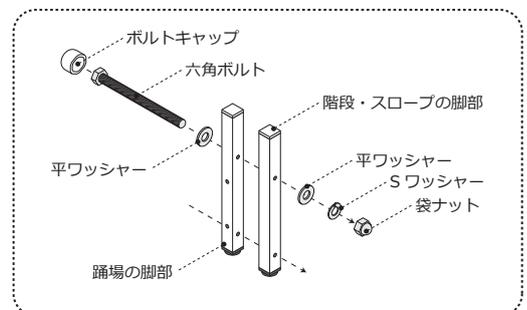
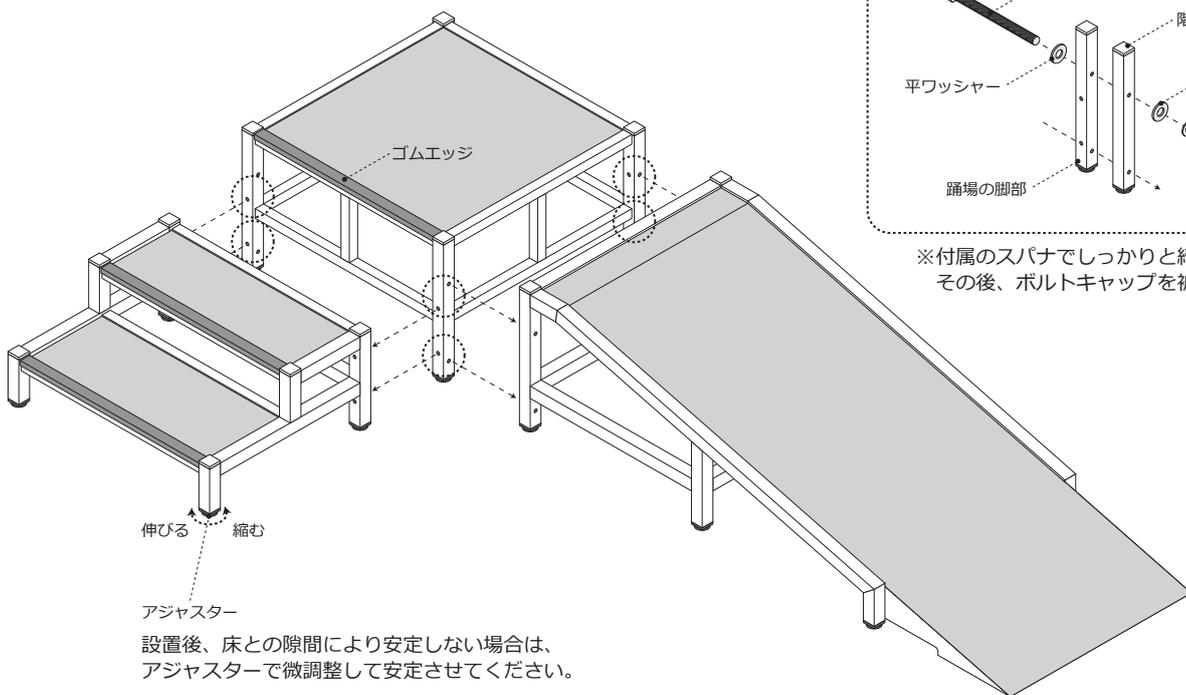


※付属のスパナでしっかりと締めてください。  
その後、ボルトキャップを被せてください。

## 組立方法

● 組立時間：約 30 分

下图のように、踊場・階段・スロープを組み立ててください。【直線型】  
※踊場のゴムエッジがある面と階段を組み立ててください。

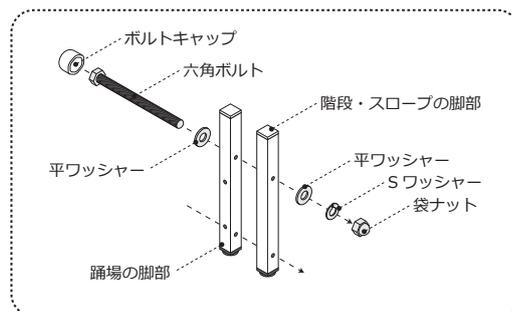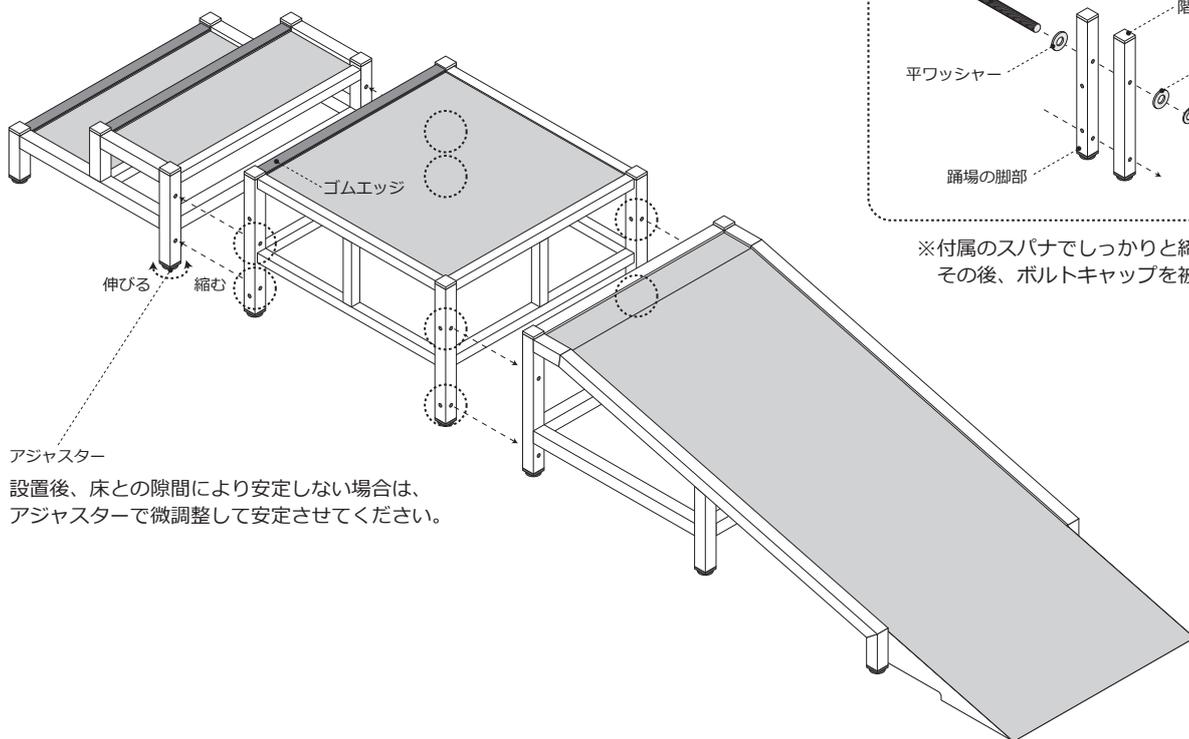

※付属のスパナでしっかりと締めてください。  
その後、ボルトキャップを被せてください。